

Dräger Primus[®] / Primus[®] IE Guia Rápido

1 Ligar as mangueiras de O₂, Ar, N₂O e AGS e o cabo da electricidade, que se encontram na parte traseira do equipamento.


2 ACESSÓRIOS

(Os sensores de fluxo encontram-se no interior da cassete do paciente)

- Circuito do paciente de dupla traqueia com peça em Y + Filtro (Ocluir para o teste)
- Traqueia intermédia com balão de respiração manual
- Linha de amostra
- Copo de condensados
- Canister de Cal



3 Ligar o Primus no Botão dianteiro (ON / OFF)

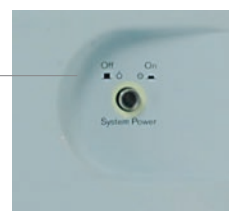


4 Realizar o teste




Ocluir a peça em Y



Válvula APL a 30 mbar

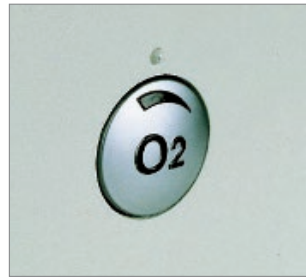

O2 de emergência fechado

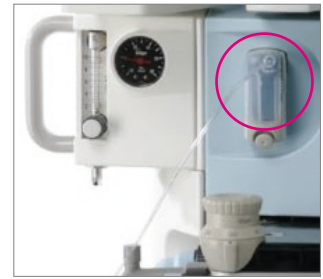


Conectar a linha de amostra ao filtro e ao copo de condensados

Confirmamos com o botão rotativo. O teste é totalmente automático e dura aproximadamente 5 minutos.


5 No ecrã de Standby: Selecionar % O2, Fluxo de gás fresco, idade, peso ideal e modo ventilatório.

Alterar os valores rodando o botão rotativo e para confirmar cada seleção premir no mesmo.

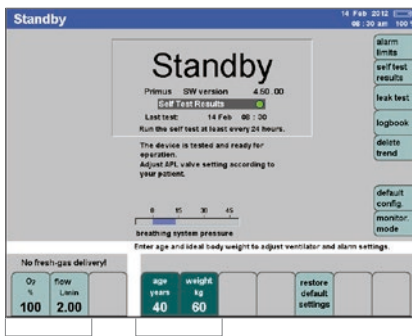

% O2 e Fluxo

Idade e Peso ideal

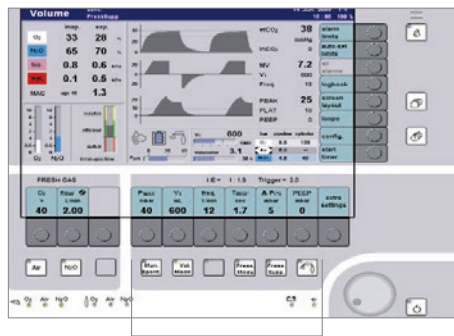

Modo Ventilatório

6 AJUSTE DOS PARÂMETROS SEGUNDO O MODO VENTILATÓRIO ESCOLHIDO E MONITORIZAÇÃO DO VOLUME MINUTO

The screenshot shows the Dräger Primus control panel interface. At the top, it displays 'Volume AF' and 'synh. #pressSupp'. The main display area is divided into several sections:

- Gas Settings:** O₂ (70), N₂O (26), Sev. (2.4), Des. (2.2), MAC (1.8), and MAC (1.6).
- Waveforms:** etCO₂, inCO₂, MV, V_r, Freq., PEAK, PLAT, and PEEP.
- Parameters:** etCO₂ 38 mmHg, MV 7.2, V_r 600, Freq. 12, PEAK 18, PLAT 18, PEEP 5.
- FRESH GAS:** O₂ 70, flow 1.00, P_{max} 40, V_r 600, freq. 12, T_{resp} 1.7, Δ P_{ps} 9, PEEP 5.
- Other Settings:** I:E = 1:1.3, Trigger = 3.0.

 On the right side, there is a vertical menu with buttons for 'alarm limits', 'auto-set limits', 'show all alarms', 'logbook', 'screen layout', 'loops', 'config', and 'start timer'. A red alarm icon is visible in the top right corner. At the bottom, there is a rotary knob and a standby button.

Silenciar Alarmes (Vermelho/Amarelo/Azul)

Monitorização de gases, curvas e valores medidos

Ajuste de %O₂, Fluxo, Modo Ventilatório e parâmetros ventilatórios,

Utilizar o **botão rotativo** para modificar e confirmar todas as alterações.

Tecla Standby para finalizar terapia

NOTA: Este guia rápido não substitui o manual de instruções fornecido pelo fabricante.

SEDE PRINCIPAL
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Alemanha
 www.draeger.com

ESPAÑA
 Dräger Medical Hispania S.A.
 C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
 Tel +34 90 011 64 24
 Fax +34 91 358 36 19
 atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
 Dräger Portugal, Lda.
 Rua Nossa Senhora da
 Conceição, n.º 3, R/c
 2790-111 Carnaxide
 Tel +351 21 155 45 86
 Fax +351 21 155 45 87
 clientesportugal@draeger.com